

COMP CORE™

Csonkfelépítő



COMP CORE™ AF - NORMÁL ÉS FOLYÉKONY

A korszerű összetételű, nanotechnológia alkalmazásával készülő, fluoridleadó képességgel rendelkező, kompozit alapú dual kötésű (fényre és önkötő) csonkfelépítő anyag, amely kivételesen jó röntgenárnyékot biztosít.

A felhasznált nano méretű töltőanyagoknak köszönhetően több mint 20%-kal nagyobb szilárdság és több mint 30%-kal kisebb zsugorodás.



Fizikai tulajdonságok:

Nyomószilárdság: 250 MPa

Munkaidő: 2 - 2.5 perc

Önkötési idő: 4 - 4.5 perc

Fényre kötési idő: 40-50 másodperc

Forgalomba kerül: normál CompCore™ AF STACK SyringeMix és folyékony CompCore™ AF Flow SyringeMix formában, fehér és A3 színekben.

A készlet tartalma:

2x 9g csonkfelépítő anyag Automix fecskendőben, 15 db keverőcsőr, 10 db standard és 10 db extra finom intraorális csőr



EGYSZERŰ ALKALMAZÁS 5 LÉPÉSBEN

1

Tisztítsa és szárítsa meg a frissen preparált fogfelszínt.




2

A Bond Boost SE™ ragasztót három rétegben vigye fel a fogfelszínre, majd szárítsa meg.



3

Az Ön által preferált bond rendszerből vigyen fel egy vékony réteget a fogfelületre, majd világítsa meg a gyártó utasításai szerint.

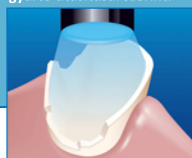

4

Helyezze a keverőcsőr végét az üreg aljára, majd oszlassa el egyenletesen a CompCore™ AF csonkfelépítőt.



5

Világítsa meg 40-50 másodpercig a CompCore™ AF felépítményt. Kémiai kötés kb. 4-4,5 perc.

