

Készíts színes lenyomatot!

Merev, ellenálló, színes egyszerhasználatos lenyomatkanalak



Neotray[™]
Lenyomatkanalak

Gold Mesh™ Technológia
Ellenálló műanyagból készült kanalak


Különleges KR™ műanyag
Merev, egyszerhasználatos műanyag kanalak, a fémkanalak árának töredékéért. Nem kell foglalkozni a tisztítással, fertőtlenítéssel

Felére csökkent székidő
Egyidőben történik a lenyomat, az antagonista lenyomat és a harapásvétel

Költséghatékony
Rövidebb székidő, kevesebb anyagfelhasználás és kevesebb hibalehetőség

Nagyobb pontosság
Ritkább a javítás és az újrakészítés

Betegek által kedvelt színekben, hétféle formában kapható.

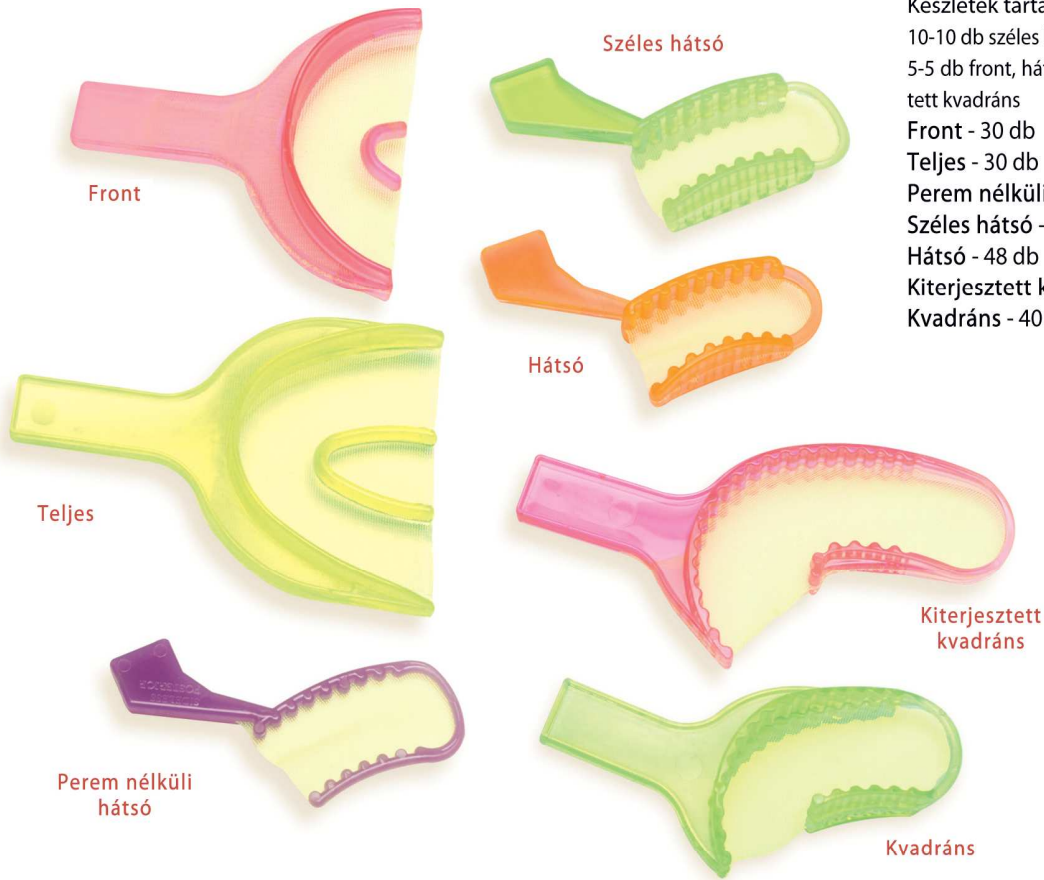


Készletek tartalma - Vegyes, 45db kanál
 10-10 db széles hátsó és perem nélküli hátsó
 5-5 db front, hátsó, teljes, kvadráns és kiterjesztett kvadráns
 Front - 30 db
 Teljes - 30 db
 Perem nélküli hátsó - 48 db
 Széles hátsó - 48 db
 Hátsó - 48 db
 Kiterjesztett kvadráns - 35 db
 Kvadráns - 40 db

A lenyomatvétele olyan egyszerű, mint...



1.

Válassza a megfelelő méretű kanalat és bizonyosodjon meg arról, hogy nem zavarja az okklúziót.

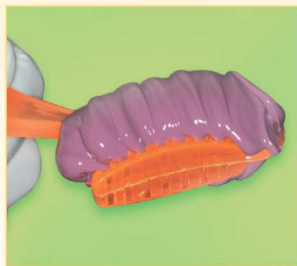

2.

Töltse fel a kanál mindkét oldalát, lenyomatanyaggal.



3.

Juttasson az anyagból a lemintázandó terület kritikus részeire, majd helyezze a feltöltött kanalat a szájba. Kérje meg a beteget, hogy szorítsa össze a fogait. Ellenőrizze az okklúziót!



4.

Vizsgálja meg, hogy a lenyomat megfelelően részletgazdag-e, és hogy nem látható sehol a kanál fala.

Küldje a fertőtlenített lenyomatot a laborba.



Az Ön Premier partnere: WWW.FOGBOLT.HU R-Dent Kft. / Info@foglobolt.hu Veszprém, Széchenyi utca 1.

☎ 88/565-002 📠 88/565-003



MDS
 Burckhardtstr. 1
 30163 Hannover, Germany

