


NexTemp!

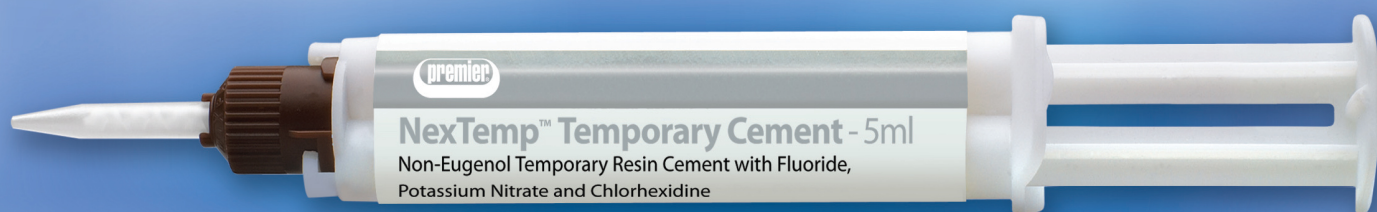

NexTemp™ Rezin alapú ideiglenes ragasztócement

Erős tartás/könnyű eltávolítás

4x erősebb ragasztóerő, a cink-oxid cementhez viszonyítva

Eugenolmentes

Nincs lágyszövet irritáció, nem gátolja a végleges ragasztók kötését

Fluorid leadó képesség

Kálium-nitrát tartalom

Érzékenység csökkentő hatás, nyugtatja a pulpát

Klór-hexidin tartalom - antibakteriális hatás

Rezin-mátrix alap

Hatékony széli záródást biztosít, nincsen anyagkioldódás

Két fázisú kötési folyamat


Körülbelül 2 perc után, a gél-fázisban a pótlás stabilizálódik, de az anyagmaradék könnyen eltávolítható. A végleges megszilárduláshoz 3 perc szükséges.

Fecskendő önkeverő csőrrel

Gyorsabb alkalmazást és homogén keveréket eredményez

Semleges színárnyalat

Színe jól illeszkedik az ideiglenes fogpótláshoz, nem tűnik át

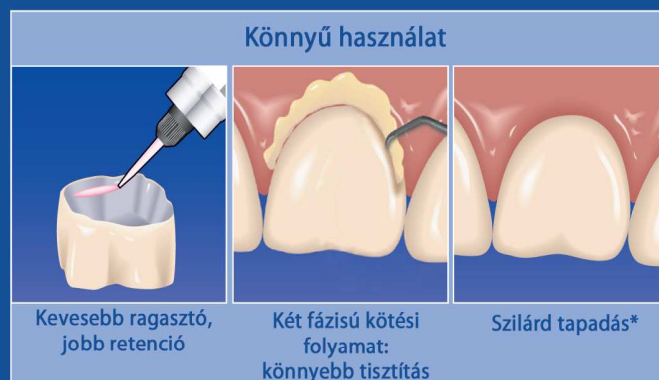

* Teljes kötési idő: 4 - 5 perc



Az Ön Premier partnere: WWW.FOGBOLT.HU R-Dent Kft. / Info@foglobolt.hu Veszprém, Széchenyi utca 1.

☎ 88/565-002 📠 88/565-003

NexTemp™ Ideiglenes cement technika

PREMIER® NEXTEMP™ IDEIGLENES CEMENT - Egyszerű használat

- 1 Izolálja és szárítsa meg az előkészített fogat.
- 2 Nyomjon ki egy kis anyagot a fecskendőből. Helyezze fel a keverőcsőrt majd újra nyomjon ki egy kis anyagot.
- 3 Oszlasson el egy kisebb mennyiségű ragasztót a korona belső peremén.
- 4 Helyezze fel a pótlást és tartsa a helyén. Körülbelül 2 perc alatt a cement eléri a gél-fázist, így könnyen és biztonságosan eltávolítható a felesleg.
- 5 A gél-fázis után egy perc múlva a ragasztóanyag megszilárdul.

PERIOWISE®

Használja a PerioWise® parodontális szondát az íny állapotának értékeléséhez.

Standard készlet

Tartalma: 1 x 5 ml Automix Dual-Barrel fecskendő,
10 db keverőcsőr

Keverőcsőr Automix Dual-Barrel fecskendőhöz

Tartalom: 25 db keverőcsőr

Flashing Crown Remover



Flashing Crown Remover • 1003576

As recommended by Dr. Donald Flashing

Flashing Crown Remover
Ideális az ideiglenesen felragasztott koronák sérülésmentes eltávolításához.



Az Ön Premier partnere: WWW.FOGBOLT.HU R-Dent Kft. / Info@fogbolt.hu Veszprém, Széchenyi utca 1.

☎ 88/565-002 📠 88/565-003