

PERFECTA

karbamid-peroxid alapú otthoni fogfehérítő rendszer

Előnyök

A legtöbb fogfehérítő rendszernél használt glicerín alapú géllal szemben, a Perfecta karbamid-peroxid alapú fogfehérítő termékcsalád glycol bázisú géllal készül az érzékenység megelőzése érdekében.

Helyesen használva nagyon ritkán jelentkeznek a fogak hőingerekkel szembeni fokozott érzékenysége. Javasolt a fokozatos hozzászoktatás. Az első héten napi egy, a második héttől napi kétszer egy óra használat javallott. (Szükség esetén a koncentráció fokozatos emelése ajánlott.)



Perfecta 11%

Gyenge, vagy közepes erősségű, elsősorban külső eredetű (extrinsic) elszíneződés esetén, fiatal betegeknél, vagy olyanoknál, akiknek az anamnézisében szerepel a fogak fokozott érzékenysége a termikus ingerekkel szemben.



Perfecta 16%

Erős elszíneződés, dohányosok esetleg tetracyclin okozta problémák esetén ajánlott, akiknél nem szerepel az anamnézisében a fogak érzékenysége.



Perfecta 21%

Tetracyclin elszíneződés, fluorózis, egyszerűen a problémás esetekben ajánlott, kizárólag csak azoknál, akiknél nem szerepel az anamnézisében a fogak érzékenysége.

Megrendelhető



Semleges és mentolos ízben, 11%, 16% és 21%-os koncentrációban.



Páciens készlet tartalma:

6x3 ml fehérítő gél fecskendőben, 6 db végződés, betegtájékoztató színelccsal, orvos tájékoztató.